

Kompaktní diagnostická laboratoř Spirodoc®

• MODULÁRNÍ

K dispozici ve 3 verzích s dotykovým displejem:

- SPIROMETR
- OXYMETR
- SPIROMETR A OXYMETR

• FLEXIBILNÍ

- Kompletní autonomní funkce s velkou kapacitou paměti (10.000 spirometrických měření)
- On line měření s bezdrátovou (Bluetooth) a USB konektivitou

• KOMPLETNÍ

WinspiroPRO® PC SOFTWARE (pro Windows) je vždy součástí dodávky zařízení, s **bezplatnými** aktualizacemi a EMR integrací.



• VÍCEÚČELOVÝ

- Spirometrické testy: FVC, VC&IVC, MVV, PRE a POST bronchodilatační test
- Oxymetrické testy: Okamžitý test, 6 Minutový test chůze, spánková analýza
- ed diary: fast on-screen symptoms entry
- "3D Oxymetr®": pohybový senzor korelující úroveň SpO2 ve vztahu k fyzické aktivitě (krokoměr, pohybová analýza, VMU)

PC Spirometr s volitelnou oxymetrií Minispir®

• MODULÁRNÍ

K dispozici ve 2 verzích:

- SPIROMETR
- SPIROMETR A OXYMETR

• JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

- Křivky výdechu a nádechu v reálném čase
- Pediatrický-motivační režim
- Okamžitý test Oxymetrie



• KOMPLETNÍ

WinspiroPRO® PC SOFTWARE (Windows), je vždy součástí dodávky zařízení, s **bezplatnými** aktualizacemi a EMR integrací.



Bezkonkurenční měření dechu

Jednorázové trubíčky FlowMIR®
mění hru!

Jednoduché, Přesné, Hygienické

Balené v čistém prostředí, 100% hygiena garantována

Spirodoc®

Autonomní funkčnost


- 1 Zvolte druh testu (nebo zvolte "Fast Test" - Rychlý Test, k provedení testu bez zadání pacientových dat)
- 2 Vložte nového pacienta nebo zvolte pacienta (neplatí pro „Fast Test“)
- 3 Po provedení testů stiskněte tlačítko "POWER", výsledky se zobrazí na displeji
- 4 Připojte zařízení k PC pomocí USB ke stažení dat.
- 5 Je-li potřeba, stiskněte ikonu klíče pro přístup k nastavení zařízení

On Line funkčnost Bluetooth® připojením

- 1 Následujte winspiroPRO® instrukce k provedení on line testů a přístupu ke všem pokročilým funkcím winspiroPRO®

On Line funkčnost USB připojením

- 1 Připojte zařízení k PC pomocí dodaného USB kabelu
- 2 Následujte winspiroPRO® instrukce k provedení on line testů a přístupu ke všem pokročilým funkcím winspiroPRO®

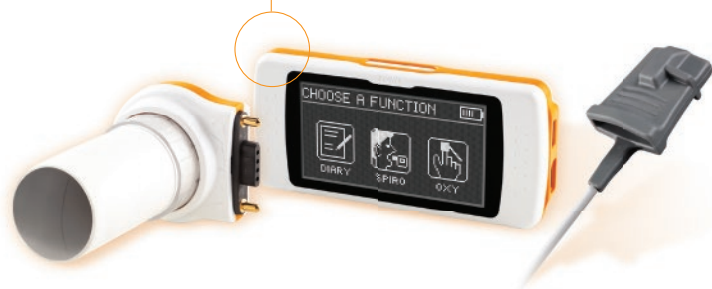

Minispir®

On Line funkčnost USB připojením

- 1 Připojte zařízení k PC pomocí dodaného USB kabelu
- 2 Následujte winspiroPRO® instrukce k provedení on line testů a přístupu ke všem pokročilým funkcím winspiroPRO

Doporučení

- Pro spirometrické testy používejte nosní klip a jednorázové turbíny FlowMIR® nebo MIR turbíny pro opakované použití a ujistěte se zda se pacient cítí pohodlně
- Korektní technika spirometrie vyžaduje 3 přijatelné testy k získání přesného výsledku

ITALY - MIR Head Office

Via del Maggiolino, 125
00155 Roma

T. +39 06 22 754 777
F. +39 06 22 754 785
mir@spirometry.com



www.spirolab.cz

www.spirotel.cz

DISTRIBUTOR

UTILCELL, s.r.o.
nám. V. Mrštika 40
664 81 Ostrovačice
Česká republika

T. +420 546 427 053
F. +420 546 427 212
info@corazonplus.cz